



# PROCEDURE D'INSTALLATION DE LA BIBLIOTHEQUE DWOS

Cliquer sur l'onglet « Paramètres » (  ) :

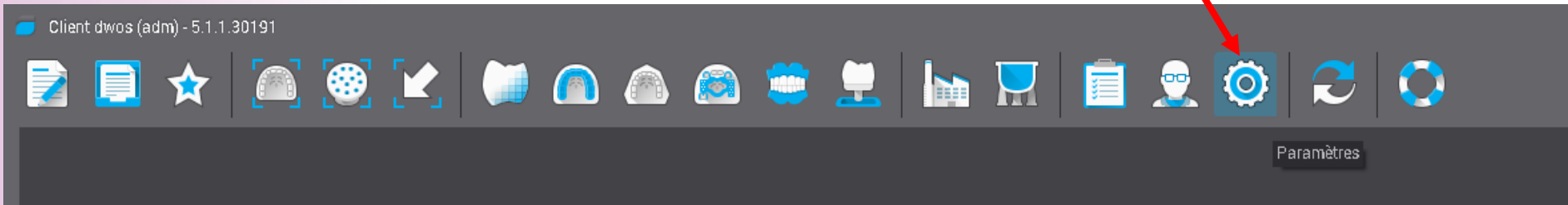


Sélectionner « Kits d'implants » :

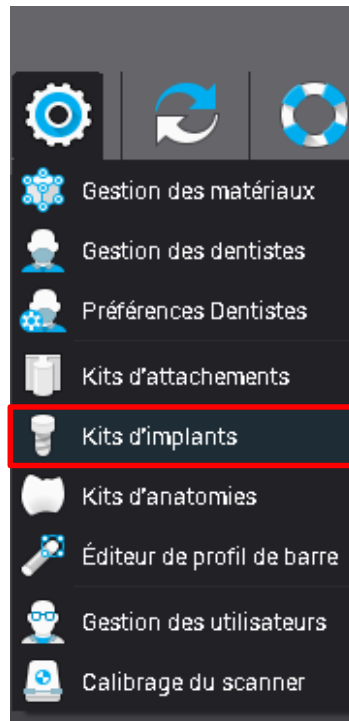

L'éditeur de kits d'implants s'ouvre.

- Cliquer, en bas à gauche de l'écran, sur le plus (+)
- Sélectionner « Nouveau fabricant » :

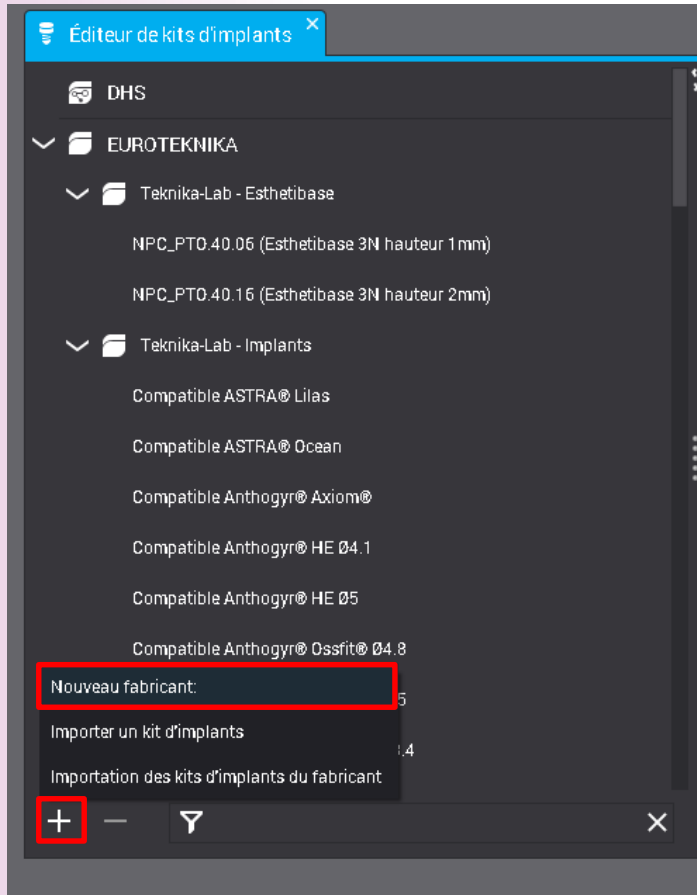

- Taper le nom du fabricant « Euroteknika »
- Valider par « OK » :


Nouveau fabricant:

Nouveau fabricant:


Nom de fabricant: Euroteknika

OK Annuler

- Chercher le nom du fabricant rentré à l'étape précédente.
- Faire un clic droit et sélectionner dans la liste « Importation des kits d'implants du fabricant » :

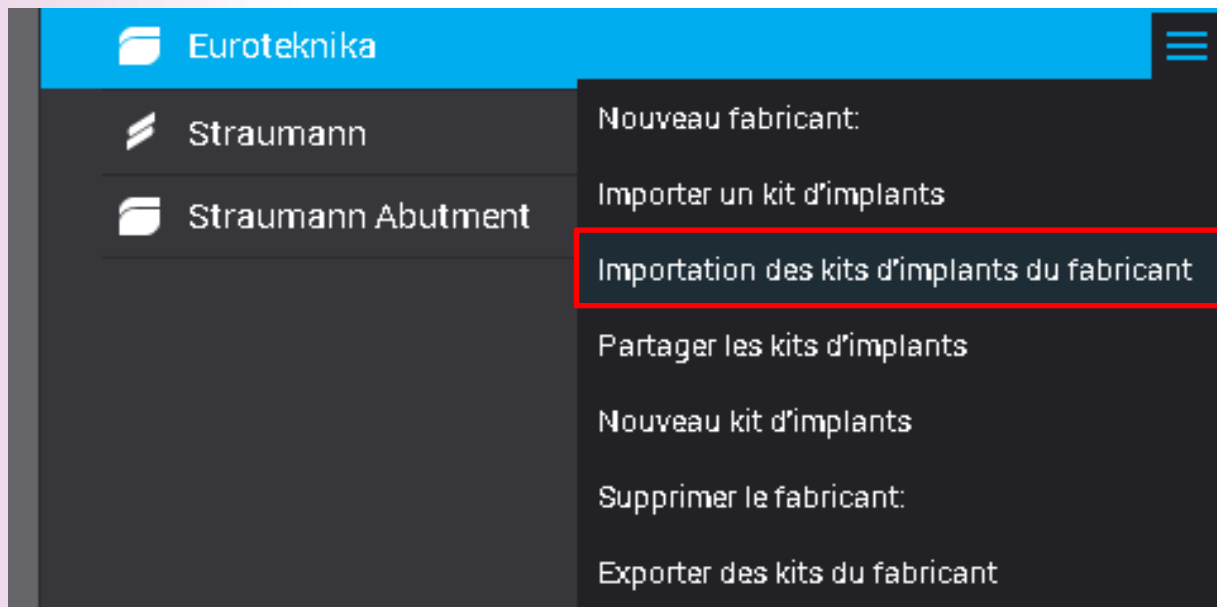

- Sélectionner dans le fichier téléchargé, le kit d'Implants et/ou le kit Piliers et/ou le kit Esthetibases au format .zip
- Faire « ouvrir » :

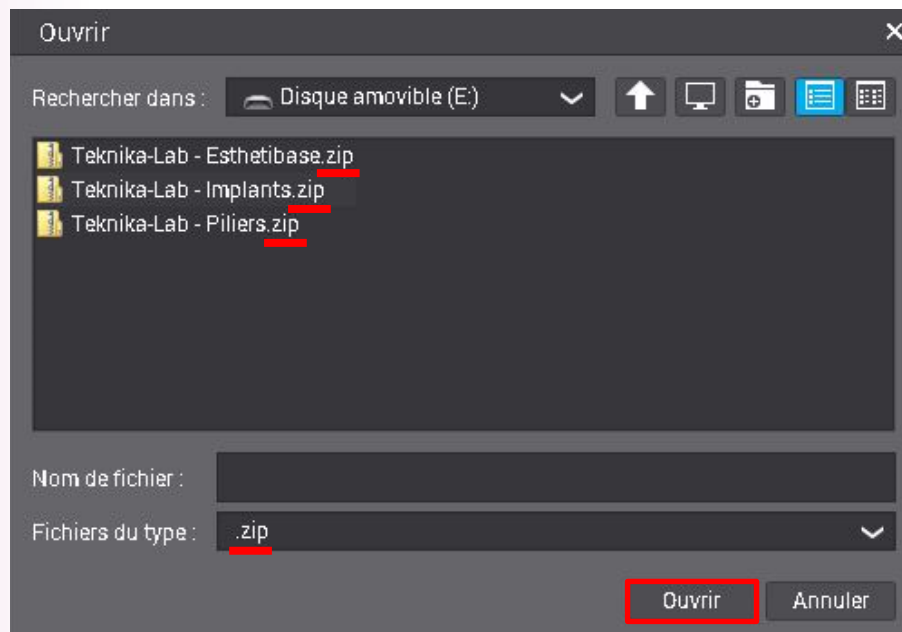

# Votre bibliothèque DWOS est dorénavant installée :

